

GEBRUIKSAANWIJZING

Mammo I 665



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Mammo stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Index

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Overzicht standaard model.....	4
Mammo 665.....	4
Opties	4
Gebruik.....	5
Centrale rem	5
Zithoogteverstelling	5
Armsteunen verstelbaar of afneembaar (optioneel)	5
Voetenplank.....	5
Verzorging en onderhoud	6
Technische data	6
Stoel informatie	6
Dimensies.....	6



Introductie

Een goede mammografiestoel dient stabiel, ruim, gemakkelijk verrijdbaar, toegankelijk, eenvoudig rembaar en op alle momenten in hoogte verstelbaar te zijn. Daarnaast is een goede en stabiele voetensteun van belang. De Mammo voldoet aan al deze punten, is dankzij het H-frame enorm stabiel en is centraal te blokkeren op alle wielen. De zithouding is actief en de lage rugleuning biedt een goede ondersteuning met voldoende bewegingsvrijheid. Optioneel zijn armleuningen die in hoogte verstelbaar zijn of eenvoudig te verwijderen zijn voor een zijwaartse instap.

Norm

De Mammo stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.

Overzicht standaard model

Mammo 665



Opties



2D Verstelbare armleggers



Afneembare armleggers

Gebbruik

Centrale rem

- De Mammo met centraal remsysteem kan op de rem worden gezet door het voetpedaal naar beneden te drukken.
- Om de stoel te ontgrendelen moet het voedingspedaal weer in de normale stand worden geduwd.



Zithoogteverstelling

- De zithoogte van de Mammo is te verstellen door middel van een voetpomp: trap het pedaal naar beneden om te verstellen. Om de stoel te verlagen moet het pedaal volledig naar beneden geduwd worden.
- Om de draaifunctie vast te zetten dient het voetenpedaal naar boven geduwd te worden.



Armsteunen verstelbaar of afneembaar (optioneel)

- De 2D armsteunen kunnen via een knop aan de zijkant van de leuning in hoogte versteld worden.
- De afneembare armsteunen kunnen via een draaiknop onder de stoel losgeschroefd en verwijderd worden.



Voetenplank

- De Mammo is standaard uitgevoerd met een voetenplank om voor een stabiele zithouding te zorgen tijdens de behandeling.



Verzorging en onderhoud

- De Mammo dienst gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Mammo moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Controleer regelmatig de wielen en verwijder indien nodig haren en stof.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.

Technische data

Stoel informatie

Stalen H-frame.

Voetenplank.

Hydraulische voetpomp.

Zitting/rugleuning van hout/schuim/kunststof.

Centraal geremde wielen, diameter 100mm.

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin.

Armsteun van PUR (polyuretheen).

Dimensies

Totale lengte in staande positie: 90 cm

Totale breedte: 60 cm

Zithoogteverstelling: 60-80 cm

Mammo gewicht: 32 Kg

Maximaal gebruikersgewicht: 125 Kg

