

GEBRUIKSAANWIJZING

Surgimove | 515.7 | 525.7 | 531.7 | 558.7



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Surgimove stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Index

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Overzicht standaard model.....	4
Surgimove 515.7	4
Surgimove 525.7	4
Surgimove 531.7	5
Surgimove 558.7	5
Opties	5
Gebruik.....	6
Voetbediende hoogteverstelling	6
Centraal bedienbare voetrem.....	6
Armsteunen verstelbaar/fixeerbaar/draaibaar (optioneel)	6
Verzorging en onderhoud	7
Technische data	7
Stoel informatie	7
Dimensies	7



Introductie

De Surgimove is specifiek ontwikkeld voor gebruik in operatiekamers. Uit het oogpunt van steriliteit kan de stoel zoveel mogelijk met de voet bediend worden. Zo is de zithoogte met de voet te bedienen en kan de stoel met een voetpedaal op de rem worden gezet. De grote zwenkwielen maken de stoel extreem wendbaar en in geremde toestand zijn de wielen tevens draaigeblokkeerd ("Total lock") wat er voor zorgt dat de stoel geen kant op kan.

Norm

De Surgimove stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.



Overzicht standaard model

Surgimove 515.7



Surgimove 525.7



Surgimove 531.7



Surgimove 558.7



Opties



Draaibare OK armleggers



3D fixeerbare armleggers



3D/4D armleggers



Gebruik

Voetbediende hoogteverstelling

- De Surgimove is standaard uitgerust met een voetbediende gasveer. De stoel kan omhoog worden gezet door middel van het indrukken van de ring.
- De stoel kan weer omlaag worden gezet door middel van het tegelijkertijd druk uitoefenen op de zitting en het indrukken van de ring.



Centraal bedienbare voetrem

- De Surgimove is standaard uitgerust met een centraal bedienbare voetrem. De wielen kunnen op de rem worden gezet door middel van het naar beneden drukken van de voorkant van de rem met de voorkant van de voet.
- De wielen kunnen van de rem worden afgehaald door middel van het naar beneden drukken van de achterkant van de rem met de achterkant van de voet.



Armsteunen verstelbaar/fixeerbaar/draaibaar (optioneel)

- De 3D armlegger is in twee richtingen te verstellen. Door middel van de knop aan de zijkant kan de armlegger omhoog en omlaag gebracht worden. De pad kan naar voren en achter verschoven worden door middel het gebruik van de hand.
- De 4D armlegger is in drie richtingen te verstellen. Door middel van de knop aan de zijkant kan de armlegger omhoog en omlaag gebracht worden. De pad kan naar voren en achter verschoven worden door middel van het gebruik van de hand. De pad kan naar binnen en buiten gedraaid worden door middel van het gebruik van de hand. **Let op:** de pad kan alleen naar buiten gedraaid worden indien deze naar binnen gedraaid staat.
- De fixeerbare armlegger kan in alle richtingen versteld worden. De armlegger kan naar boven en beneden versteld worden door middel van een hendel onder aan de armlegger. De pad kan naar voren en achter verschoven worden met de hand en doormiddel van de hendel worden vastgezet. De pad kan gedraaid worden naar alle kanten en kan doormiddel van de draaiknop worden vastgezet op de gewenste hoek.



- De draaibare armlegger is in twee richtingen verstelbaar en kan worden meegeleverd in dezelfde stoffering als de rest van de stoel. De armlegger kan naar boven en beneden versteld worden door middel van een hendel onder aan de armlegger. De armlegger kan naar links en naar rechts gedraaid worden en kan doormiddel van de draaiknop worden vastgezet.



Verzorging en onderhoud

- De Surgimove dient gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Surgimove moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Controleer regelmatig de wielen en verwijder indien nodig haren en stof.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.

Technische data

Stoel informatie

Metalen frame met "Total lock" wielen

Voetbediende hoogteverstelling.

Centraal bedienbare voetrem

Zitting/rugleuning van hout/schuim/kunststof.

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin.

Armsteun van PUR (polyuretheen) (optioneel)

Dimensies

Totale lengte in staande positie op laagste stand: 95cm | 95cm | 95cm | 85cm

Totale lengte in staande positie op hoogste stand: 114cm | 114cm | 114cm | 104cm

Totale breedte: 58 cm

Zithoogteverstelling: 56-74 cm | 56-74 cm | 58-76 cm | 62-80 cm

Surgimove gewicht: 22 Kg

Maximaal gebruikersgewicht: 125 Kg

