

GEBRUIKSAANWIJZING

Dermo I 639 I 660.9



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Dermo stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Index

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Dermo 639	3
Dermo 660.9	3
Overzicht modellen	4
Dermo 639	4
Opties	4
Dermo 660.9	5
Optie.....	5
Gebruik Dermo 639.....	6
Rem	6
Centrale rem	6
Verstelling van de armleuningen	6
Verstelling van de beensteunen	6
Verstelling enkelsteunen (optioneel)	6
Zithoogteverstelling	7
Gebruik Dermo 660.9.....	8
Zithoogteverstelling	8
Beensteunen	8
Armleggers	8
Hoofdsteun (optioneel).....	8
Verzorging en onderhoud	9
Technische data	9
Stoel informatie Dermo 639	9
Dimensies	9
Stoel informatie Dermo 660.9	9
Dimensies	9



Introductie

De collectie Dermo podologiestoelen is speciaal ontworpen voor patiënten die behandeling nodig hebben aan de voeten. De stoelen zijn ontwikkeld voor gebruik in kleine ruimtes. De twee beensteunen zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen. Uniek aan de elektrisch verstelbare uitvoering (de Dermo 639) is de maximale zithoogte van 98 cm, waardoor het mogelijk is om staand aan deze stoel te werken.

Norm

De Dermo stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

Dermo 639

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.

Dermo 660.9

- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Let op dat de stoel niet zwaarder belast wordt dan 150 kg.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.



Overzicht modellen


Dermo 639



Opties



Papierrolhouder

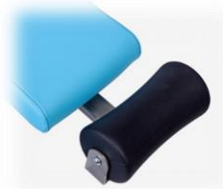

Uitschuifbare enkelsteun



Hoofdkussen

Ook verkrijgbaar in een obese variant met hydraulische voetspomp. Zie de technische data van deze stoel verderop in de handleiding voor de maten.

Dermo 660.9



Optie



Verstelbare hoofdsteun

Gebruik Dermo 639

Rem

- De Dermo is standaard uitgerust met twee vergrendelbare voorwielen. De wielen worden vergrendeld door het lipje op de wielen naar beneden te drukken.
- Zet het lipje weer omhoog om de wielen te ontgrendelen.



Centrale rem

- Het centraal remsysteem kan op de rem worden gezet door het voetpedaal naar beneden te duwen. Hierdoor worden de twee achterwielen geblokkeerd.
- Duw het voetpedaal terug in de normale stand om de wielen te ontgrendelen.



Verstelling van de armleuningen

- De armleuningen kunnen door middel van het drukken op de knop op de leuning op gewenste hoogte worden geplaatst.
- Ze zijn in diepte te verstellen door middel van het meebewegen met de leuning met de hand.




Verstelling van de beensteunen

- De hoek van de beensteunen kan worden aangepast door middel van het trekken/duwen van de hendel die op de zijkanten zit van de beensteun.



Verstelling enkelsteunen (optioneel)

- De stand van de enkelsteunen kan met de hand worden afgesteld door middel van het losdraaien van de knop.
- Draai de knop weer vast na het afstellen.

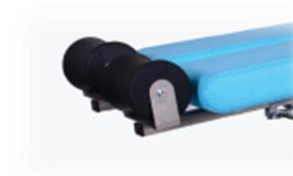

Zithoogteverstelling

- De zithoogte is te verstellen door middel van het indrukken van de omhoog/omlaag knop op de bedieningskast. De maximale zithoogte is 94 cm.
- Zorg ervoor dat de wielen van de stoel geremd zijn voordat de zithoogte aangepast wordt.



De Dermo in hoogst mogelijke positie:



Gebruik Dermo 660.9

Zithoogteverstelling

- De zithoogte van de Dermo is te verstellen door middel van een voetbediening: trap het pedaal zachtjes met kleine bewegingen naar beneden.
- Wanneer de hendel volledig naar beneden gedrukt wordt, zal de stoel omlaag gaan.
- Door de hendel omhoog te duwen met de voet, wordt de draaiverstelling van de stoel geblokkeerd.



Beensteunen

- De beensteunen zijn met een hendel in hoek verstelbaar. Door aan de hendel te trekken zal de gasveer helpen de benen naar boven te plaatsen.
- Door aan de hendel te trekken kunnen de beensteunen weer naar beneden met behulp van het gewicht van de benen.
- De lengte van de beensteunen zijn instelbaar met de ronde knop aan de onderzijde van de beensteun. Na het losdraaien van de knop is het mogelijk de onderste buis naar binnen of verder naar buiten te schuiven waardoor de beensteun korter of langer wordt.



Armleggers

- Door de knop onder de zitting los te draaien kunnen de armleggers naar binnen of buiten versteld worden.



Hoofdsteun (optioneel)

- De hoofdsteun is door middel van een knop op de achterzijde van de rug van de stoel in hoogte verstelbaar.



Verzorging en onderhoud

- De Dermo moet worden schoongemaakt met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Dermo moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Controleer regelmatig de wielen en verwijder indien nodig haren en stof.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.

Technische data

Stoel informatie Dermo 639

Frame uit stalen buizen en plaatwerk voorzien van poedercoating.

Centraal geremde wielen van kunststof, diameter 100 mm

Voetgeremde wielen van kunststof, diameter 100 mm

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin

Armsteun en enkelsteun (optioneel) van PUR (polyuretheen)

Dimensies

Totale lengte in rechtopstaande positie: 91 cm

Totale lengte in horizontale positie: 198 cm

Totale breedte: 60 cm, obesitas variant: 80 cm

Zithoogteverstelling: 54-94 cm

Dermo gewicht: 36 kg, obesitas variant: 42 kg

Maximale gebruikersgewicht: 150 kg

Maximale gebruikersgewicht Dermo obesitas variant: 250 kg

Stoel informatie Dermo 660.9

Frame uit stalen buizen en plaatwerk voorzien van poedercoating.

Schotelonderstel Ø 60 cm

Hydraulische voetpomp

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin

Armsteun van PUR (polyuretheen)

Dimensies

Totale lengte in staande positie: 97 cm

Totale breedte: 60 cm

Zithoogteverstelling: 50-70 cm

Dermo gewicht: 27 kg

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

