

GEBRUIKSAANWIJZING

Veria I 660.1 | 610.9 | 620.1 | 620.9



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Veria stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Overzicht standaard modellen.....	4
Veria 610.1 stoel met gaslift	4
Veria 610.9 stoel met hydraulische pomp	4
Veria 620.1 stoel met gaslift	5
Veria 620.9 stoel met hydraulische pomp	5
Optie.....	5
Gebruik.....	6
Centrale rem	6
Verstelling van de armleuningen	6
Zithoogteverstelling	6
Verzorging en onderhoud	7
Technische data	7
Stoel informatie	7
Dimensies	7



Introductie

De collectie Veria stoelen is ontwikkeld voor bloedafname. Hij biedt een comfortabele zithouding en armsteun voor patiënten bij wie bloed wordt afgenomen.

Norm

De Veria stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.



Overzicht standaard modellen

Veria 610.1 stoel met gaslift



Veria 610.9 stoel met hydraulische pomp



Veria 620.1 stoel met gaslift



Veria 620.9 stoel met hydraulische pomp



Optie



3D verstelbare armleuning

Gebruik

Centrale rem

- De Veria met centraal remsysteem kan op de rem worden gezet door het voetpedaal naar beneden te drukken.
- Om de stoel te ontgrendelen moet het voedingspedaal weer in de normale stand worden geduwd.



Verstelling van de armleuningen

- Draai de klem met de hand los.
- Stel de armleuning in op de gewenste hoogte.
- Fixeer de gewenste positie door de klem weer vast te draaien.



De 3D armsteun kan ook in hoek versteld worden door de hendel die zich onder de armsteun bevindt los te maken.



LET OP: Deze armsteunen zijn niet bedoeld als sta-op-hulp!

Zithoogteverstelling

- De zithoogte van de Veria is te verstellen door middel van een voetpomp: trap het pedaal naar beneden om te verstellen. Om de stoel te verlagen, duwt u het pedaal volledig naar beneden.



Verzorging en onderhoud

- De Veria dient gereinigd te worden met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Veria moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Controleer regelmatig de wielen en verwijder indien nodig haren en stof.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.

Technische data

Stoel informatie

Aluminiumbasis, stalen mechanisme.

Zitting/rugleuning van hout/schuim/kunststof.

Kunststof wielen, diameter 65mm.

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin.

Armsteun van PUR (polyurethaan).

Dimensies

Totale lengte in staande positie: 66 cm

Totale breedte: 66 cm

Zithoogteverstelling: 40-59 cm | 50-68 cm

Veria gewicht: 15 Kg | 18 Kg

Maximaal gebruikersgewicht: 125 Kg

