

GEBRUIKSAANWIJZING

Curie | 640.1 | 640.9 | 650.1 | 650.9



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Curie stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Index

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Overzicht standaard modellen.....	4
Curie 640.1 stoel met gaslift	4
Curie 640.9 stoel met hydraulische pomp.....	4
Curie 650.1 stoel met gaslift	5
Curie 650.9 stoel met hydraulische pomp.....	5
Opties	5
Gebruik.....	6
Centrale rem	6
Zithoogteverstelling	6
Hoofdsteun (optioneel).....	6
Verzorging en onderhoud	6
Technische data	7
Stoel informatie	7
Dimensies.....	7



Introductie

De collectie Curie stoelen biedt optimaal comfort tijdens onderzoek, een bloedafname of een kleine medische ingreep. Tegelijkertijd is door een compacte vormgeving de zorgprofessional in staat zich dicht bij de patiënt te begeven en past de stoel in vrijwel elke ruimte.

Norm

De Curie stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.



Overzicht standaard modellen

Curie 640.1 stoel met gaslift



Curie 640.9 stoel met hydraulische pomp



Curie 650.1 stoel met gaslift



Curie 650.9 stoel met hydraulische pomp



Opties



Vaste prikarmleuning 3D verstelbare prikarmleuning Verstelbare hoofdsteen

Gebruik

Centrale rem

- De Curie met centraal remsysteem kan op de rem worden gezet door het voetpedaal naar beneden te drukken.
- Om de stoel te ontgrendelen moet het voedingspedaal weer in de normale stand worden geduwd.



Zithoogteverstelling

- De zithoogte van de Curie is te verstellen door middel van een voetpomp: trap het pedaal naar beneden om te verstellen. Om de stoel te verlagen moet het pedaal volledig naar beneden geduwd worden.



Hoofdsteen (optioneel)

- De hoofdsteen is door middel van een knop op de achterzijde van de rug van de stoel in hoogte verstelbaar.



Verzorging en onderhoud

- De Curie dient te worden schoongemaakt met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Curie moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.



Technische data

Stoel informatie

Aluminiumbasis, stalen mechanisme.

Zitting/rugleuning van hout/schuim/kunststof.

Kunststof wielen, diameter 65mm.

Gestoffeerde elementen bekleed met Stamskin.

Armsteun van PUR (polyuretheen).

Dimensies

Totale lengte in staande positie: 97 cm

Totale breedte: 60 cm

Zithoogteverstelling: 40-59 cm | 50-68 cm

Curie gewicht: 16 kg | 19 kg

Maximaal gebruikersgewicht: 125 kg

(Optie gasveer met maximaal gebruikersgewicht: 200 kg)

