

Instructions for Use (IFU) – Verblijfsbanden

1. Product Identificatie

- Productnaam: Verblijfsbanden
- Model/Referentie: Seamless, Seamless Uni, AllDay, AllDay Uni, AllDay Uni beenslips
- Fabrikant: SlingCare B.V., Drentse Poort 25a, 9521 JA Nieuw Buinen
www.slingcare.com
- CE-markering: ja
- Medical Device Class 1, MDR 2017/745

2. Beoogd gebruiksdoel

De tilband is bedoeld voor het veilig tillen en verplaatsen van zorgvragers in combinatie met een geschikte plafond- of mobiele tillift. De verblijfsband wordt gebruikt voor een transfer van lig naar zit, van zit naar zit, van zit naar lig waarbij de tilband onder de cliënt blijft gedurende de dag. De Net tilband heeft dezelfde functie maar wordt gebruikt in natte ruimtes.

Indicatie: Voor cliënten vanaf mobiliteitsklasse C

3. Veiligheid



- SlingCare tilbanden voldoen aan de NEN-EN-ISO 10535
- Voordat u een hulpvrager met een tilband kunt gaan tillen, dient degene die de tilband aanbrengt hiervoor deskundig te zijn
- Gebruik de tilband uitsluitend wanneer deze geen beschadigingen heeft
- Gebruik de tilband uitsluitend in combinatie met tilliften en jukken (2-punts of 4-punts) die voldoen aan NEN-EN-ISO 10535. Het 4-punts juk moet voldoen aan;
 - Pendiameter tussen 6,8 en 8,2 mm
 - Kopdiameter tot 16 mm
 - Penlengte met een minimum van 6 mm
 - Koplengte met een maximum van 5,5 mm



- Overschrijd het maximale draagvermogen (SWL) van 200 kg niet.
- Laat de zorgvrager nooit onbeheerd in de tilband.
- Afgekeurde of beschadigde tilbanden direct uit gebruik nemen of retourneren aan fabrikant.
- Iedere calamiteit die zich voordoet in verband met het gebruik van deze tilband dient onmiddellijk gemeld te worden aan de fabrikant en aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in overeenstemming met de geldende regelgeving. Onder een calamiteit wordt verstaan: iedere gebeurtenis die heeft geleid of had kunnen leiden tot ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand of overlijden van de gebruiker of de zorgverlener.

- Alle door gebruikers of zorginstellingen gemaakte meldingen of calamiteiten worden door de fabrikant geregistreerd in het interne softwaresysteem voor kwaliteitsbeheer.

4. Product beschrijving

- Materiaal tilband: Dryfit M0017 / Polyester net
- Ophangpunten: clips en/of lussen
- Beschikbare maten: XXS tm XXL
- Maattabel:

Maat	Bieskleur	Gewicht	Lengte
XXS	Grijs	0-25 kg	80-115 cm
XS	Bruin	25-35 kg	115-130 cm
S	Rood	35-60 kg	130-145 cm
M	Geel	60-75 kg	145-165 cm
L	Groen	70-120 kg	165-180 cm
LL	Paars	80-150 kg	180-210 cm
XL	Blauw	100-180 kg	180-215 cm
XXL	Oranje	180-200 kg	180>

5. Gebruiksaanwijzing

5.1 Voorbereiding

1. Degene die de tilband aanbrengt dient hiervoor deskundig te zijn.
2. Lees altijd het label.
3. Controleer de tilband op beschadigingen:
 - 3.1. De banden, naden en/of stiksels van de tilband vertonen geen scheurtjes of andere beschadigingen
 - 3.2. De Visual Clips zijn niet beschadigd
4. Zorg dat de juiste maat is gekozen voor de cliënt, zie maattabel



Wanneer er sprake is van een beschadiging, gebruik de tilband dan niet en neem contact op met de leverancier

5.2 Tillen



1. Breng de tilband tot onder het zitvlak door (cliënt zit op de tilband). Deze band kan alleen liggend aangebracht worden. Bij gebruik van de Uni tilband dient de cliënt te allen tijde in ligpositie te blijven.
2. Indien er baleinen meegeleverd zijn bij de tilband, dienen deze altijd gebruikt te worden
3. Zorg dat de Visual Clips (4-punts juk) of lussen (2-punts juk) correct aan het juk bevestigd worden
 - 3.1. Het bevestigen van de Visual Clip aan de tillift doet u door de paddenstoel door de opening van de clip te steken (grijze zijde van de clip). De rode vlakken van de voorkant en achterkant worden groen wanneer de clip goed geborgd is. Voor een extra controle dat de clip goed geborgd is kunt u kijken naar de ronde opening op de

witte zijde van de clip. Bij een correcte bevestiging ziet u de paddenstoel door de ronde opening.

4. Til langzaam en observeer de cliënt continu.
5. Zorg voor een stabiele, comfortabele positie tijdens de transfer.
6. Laat de zorgvrager nooit onbeheerd in de tilband.



5.4 Na het tillen

1. Na de tilhandeling drukt u de knop van de Visual Clips in om de clip weer los te koppelen van het juk. De signaleringsvlakken worden direct weer rood.
2. Verwijder de tilband zorgvuldig.
3. Berg de tilband droog en schoon op. Houdt de tilband uit de buurt van scherpe voorwerpen, bijtende middelen of ander mogelijke oorzaken van beschadiging.



6. Schoonmaken / onderhoud

- Wasinstructie: Houd de op het label aangegeven wasinstructies aan. Gebruik bij het wassen altijd een waszak.
- Verwijder, indien van toepassing, voor het wassen de kunststof baleinen
- Gebruik normale wasmiddelen waar geen oplosmiddel of bleek in zit
- Tilbanden niet strijken en vermijd mechanische druk
- Inspecteer na elk wasproces op slijtage of beschadiging.
- Vul bijgeleverd logboek bij voorkeur in na elke wasbeurt maar minstens 1x per maand.

7. Levensduur

- Levensduur: verwachte levensduur 5 jaar (afhankelijk van gebruiksfrequentie en onderhoud).
- Afvoeren volgens lokale afvalrichtlijnen.

8. Uitleg van symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op het product worden internationaal erkende symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinformatie aan te duiden. Maak uzelf vertrouwd met de onderstaande symbolen voordat u het product in gebruik neemt:



Waarschuwing – Geeft een mogelijk risico op letsel of verkeerd gebruik aan.



Gebruiksaanwijzing lezen



CE-logo



Niet drogen



60° wassen



Niet bleken



Gegevens fabrikant



Maataanduiding



Maximale belasting

B
A
T
C
H

Batchnummer



Niet droog reinigen



Niet strijken



Keuring



MD logo