

GEBRUIKSAANWIJZING

Arteria | 630 | 631 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637



Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens de Arteria stoel in gebruik te nemen.

Datum _____

Gebruiker _____

Naam _____

Adres _____

Fabrikant Timer B.V.

Wordt exclusief verkocht door Vermea B.V. onder de merknaam Medisit.

Drentse Poort 25a

9521 JA Nieuw- Buinen

The Netherlands

T +31 (0)88 633 4700

M info@vermea.com

W www.vermea.com



Inhoudsopgave

Introductie.....	3
Norm	3
Veiligheid.....	3
Overzicht standaard modellen.....	4
Arteria 630 stoel met hydraulische pomp	4
Arteria 631 stoel met vaste hoogte &	4
Arteria 633 stoel elektrisch verstelbaar.....	4
Arteria 634 stoel met hydraulische pomp	5
Arteria 635 stoel met hydraulische pomp	5
Arteria 636 stoel met hydraulische pomp	6
Arteria 637 stoel elektrisch verstelbaar.....	6
Opties	7
Gebruik.....	8
Rem	8
Centrale rem (optioneel)	8
Verstelling van de prikarmleggers	8
Zithoogteverstelling	8
Elektrisch verstelbare zithoogte	9
Trendelenburg positie.....	9
Verzorging en onderhoud	10
Technische data	10
Stoel informatie	10
Afmetingen.....	10



Introductie

De collectie Arteria bloedafnamestoelen zijn ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, terwijl ze toch maximaal comfort aan de patiënt en gemak voor de zorgprofessional bieden.

Norm

De Arteria stoel heeft een CE- markering. De stoel is in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) 2017/745 en de Medical Device Regulation (MDR) Classificatie I. Dat de stoel voldoet aan de geldende regels binnen de EU kan worden herkend aan de volgende symbolen die op de stoel gevonden kunnen worden:



Veiligheid

- Zorg ervoor dat bij het gaan zitten of opstaan de wielen geremd zijn.
- Let op obstakels bij het verstellen van de stoel.
- Rijd en manoeuvreer alleen met de stoel in rechtopstaande positie.
- Verstel de stoel niet tijdens het rijden.
- Rijd bij voorkeur altijd achteruit over obstakels heen.
- Neem in geval van defecten contact op met uw plaatselijke dealer of rechtstreeks met de fabrikant.



Overzicht standaard modellen

Arteria 630 stoel met hydraulische pomp



Arteria 631 stoel met vaste hoogte & Arteria 633 stoel elektrisch verstelbaar



Arteria 634 stoel met hydraulische pomp



Arteria 635 stoel met hydraulische pomp



Arteria 636 stoel met hydraulische pomp



Arteria 637 stoel elektrisch verstelbaar



Opties



3D verstelbare prikarmlegger



Hoofdkussen



Centrale rem



Papierrolhouder



Infuuspaal




Sta- op steun

Gebruik

Rem

- De Arteria is standaard uitgerust met twee vergrendelbare wielen. De wielen worden vergrendeld door het lipje op de wielen naar beneden te drukken.
- Zet het lipje weer omhoog om de wielen te ontgrendelen.
- De Arteria voorzien van een hydraulische voetpomp is op de rem te zetten door middel van het omhoog duwen van het voetpedaal voor hoogteverstelling.

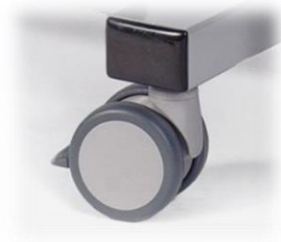

Centrale rem (optioneel)

- De Arteria met centraal remsysteem kan op de rem worden gezet door het voetpedaal naar beneden te duwen. Hierdoor worden de twee wielen geblokkeerd.
- Duw het voetpedaal terug in de normale stand om de wielen te ontgrendelen.



Verstelling van de prikarmleggers

- Draai de klem met de hand los.
- Stel de armsteun in op de gewenste hoogte.
- Zet de gewenste positie vast door de klem weer vast te zetten. **Let op!** Draai de hendel niet te hard vast. Hierdoor kan de hendel doordraaien.



De 3D-prikarmlegger kan ook in hoek worden versteld door de hendel onder de oksel los te maken.

LET OP: Deze armleggers zijn niet bedoeld als sta- op hulp!



Zithoogteverstelling

- De zithoogte van de Arteria is te verstellen door middel van een voetpomp: trap het pedaal naar beneden om te verstellen. Om de stoel te verlagen, duwt u het pedaal volledig naar beneden.



Pas op dat er tijdens het afstellen geen obstakels in de weg staan!



Elektrisch verstelbare zithoogte

- De zithoogte van de Arteria 633 & 637 kan elektrisch worden ingesteld met de handschakelaar door middel van het indrukken van de omhoog/omlaag knop op de bedieningskast.



Pas op dat er tijdens het afstellen geen obstakels in de weg staan!

Trendelenburg positie

De Trendelenburg houding is binnen de medische wereld een houding waarbij een patiënt op zijn rug ligt en waarbij het gehele ligvlak naar achteren gekanteld wordt, zodat de benen hoger liggen dan het hart. Hierdoor komt er minder bloed in het veneuze systeem van de benen, waardoor er meer bloedvolume beschikbaar is voor de hersenen.

De Arteria kan snel worden aangepast naar een volledige liggende positie:

- Houd er rekening mee dat er geen obstakels in de weg liggen.
- Duw de hendel (links of rechts) naar voren.
- Door de gecombineerde beensteun/rugleuning verandert de stoel snel in een bank.
- Druk voor de rechtopstaande positie op dezelfde hendel en help de rug in de opwaartse positie wanneer een persoon nog in de stoel zit.



Verzorging en onderhoud

- De Arteria dient te worden schoongemaakt met water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen (zeepoplossing). Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen (zoals chloor of aceton).
Let op: de overdracht van bepaalde kleurstoffen zoals inkt (pen), kleding (jeans, donkere kleuren) vallen niet onder de garantie.
- Als de Arteria moet worden gedesinfecteerd, gebruik dan een ontsmettingsmiddel zonder alcohol, dat vrij is van aldehyden.
- Controleer regelmatig de wielen en verwijder indien nodig haren en stof.
- Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
- Onderhoud moet jaarlijks plaatsvinden conform aanwijzing van de fabrikant.

Technische data

Stoel informatie

Frame van stalen buizen en plaatstaal met poedercoating.
 Standaard wielen van kunststof, diameter 75mm.
 Centraal geremde wielen van kunststof, diameter 100mm.
 Gestoffeerde zitelementen in stoffering naar keuze
 Armleuningen van PUR (polyurethaan).

Afmetingen

Totale lengte in staande positie: 81 cm
 Totale lengte in Trendelenburg positie: 168 cm
 Totale breedte: 60 cm, obesitas variant: 80 cm
 Zithoogteverstelling: 47-64 cm | 47 cm | 47-67 cm | 49-69 cm

Arteria gewicht:

630: 27 kg | 631: 31 kg | 633: 36 kg | 634: 57 kg | 635: 52kg | 636: 58 kg |
 637: 52kg

Maximale gebruikersgewicht Arteria: 150 kg

Maximale gebruikersgewicht Arteria obesitas variant: 200 kg

