

SURGICAL MASK IIR

CHIRURGISCH MASKER IIR

EN: Medical three layer single use surgical mask type IIR.

NL: Drie laags medisch chirurgisch masker type IIR voor eenmalig gebruik.

WARNING

Single use only. Store in original packing in a cool and dry place. Humid, wet or damage masks must not be worn. Facial hair will significantly reduce the efficiency of the mask

WAARSCHUWING

Voor eenmalig gebruik. Bewaar in de originele verpakking op een koele en droge plek. Vochtige, natte of beschadigde maskers mogen niet gedragen worden. Gezichtsbehaarng zorgt voor een minder efficient masker.

To Be Pure!

USAGE INSTRUCTION - GEBRUIKS INSTRUCTIE



1 Hang both ear loops of the mask around the ears.

Doe de elastiekjes om de oren.



2 Fix the nose bridge around the nose.

Vouw de neusbrug om de neus heen.



3 Pull the bottom of the mask to the lower jaw. Prevent touching the mask during and after use.

Trek de onderkant van het masker naar de kaak. Raak het masker niet aan tijdens of na gebruik.