

Gebruiksaanwijzing protectiejassen

Hoe de protectiejas aan te doen:

- Doe de protectiejas aan, zorg ervoor dat sluiting aan de achterkant zit. De protectiejas moet volledig aansluiten van nek tot knieën, armen tot aan einde polsen en moet de rug bedekken.
- De protectiejas moet dichtgemaakt worden aan de achterkant van de nek
- Knoop daarna de band om de taille vast

Hoe de protectiejas uit doen:

- Maak voorzichtig de band in de taille los en daarna de bandjes in de nek, raak alleen de bandjes aan
- Trek de protectiejas weg van de nek en de schouders en raak alleen de binnenkant van de protectiejas aan
- Draai de protectiejas binnenste buiten terwijl je dit in een bundel rolt en gooi dit dan weg

Bewaar de protectiejassen op een droge plek op kamertemperatuur.

Indien u vragen heeft over het gebruik van de protectiejassen dan kunt u contact met 12WASH opnemen via onderstaande gegevens.

=====

User Manual protective gowns

How to put on the gown:

- Put on the gown, the ties are at the back. The gown should fully cover the torso from neck to knees, arms up to the end of the wrists and wrapped around the back
- The gown should be fastened at the back of the neck
- Then fasten the ties around the waist

How to remove the gown:

- Carefully unfasten the ties in the waist and in the neck from the gown, touch only the ties
- Pull the gown away from neck and shoulders touching only the inside of the gown
- Turn the gown inside out while rolling it into a bundle and throw it away

Store the protective gowns in a dry place at room temperature.

If you have questions about how to use of the protective gowns, please contact 12WASH using the information below.

Fabrikant/Manufacturer

Timer B.V.
Drentse Poort 25a
9521 JA Nieuw Buinen
+31 (0)599 – 639 614
info@12WASH.com
www.12WASH.com



NEN-EN-13795-1:2019
NEN-EN-13795-2:2019

