



Hoxa Tabouret

- met en zonder rug
- Varianten Ergo / Curve / Pu / Beuken / Budget serie

Standaard:

- Vaste zithoek
- Aluminium onderstel
- Zachte wielen onbelast geremd (uitzondering .4 met glijders)
- Stamskin bekleding

Opties:

- Verstelbare zithoek
- Harde wielen onbelast geremd
- Glijders
- Zachte wielen belast geremd
- Blokkeerbare wielen

Hoogte instellen

- Stel de zithoogte in met de hendel (of voetbediening indien aanwezig).
- Richtlijn: voeten plat op de grond, knieën $\pm 90^\circ$.

Zitten

- Ga midden op de zitting zitten.
- De uitsparingen in de zitting verminderen druk op de bovenbenen.
- Houd een rechte, ontspannen houding en kijk of de hoogte goed is, anders stel deze bij

Rugleuning instellen (indien aanwezig)

- Stel hoogte van de rugleuning in naar comfort.
- Zorg dat deze je onderrug ondersteunt.

Verrijden

- Standaard zijn de krukken voorzien van zachte wielen die blokkeren wanneer er geen gewicht op zit. De .4-krukken hebben glijders en kunnen niet worden verplaatst. Indien gewenst kunnen deze modellen ook met wielen worden geleverd.
- Gebruik de wielen om soepel te bewegen tijdens het werken.

Gebruik & Veiligheid

- Alleen gebruiken op vlakke ondergrond
- Niet op de kruk staan
- Maximaal 1 persoon tegelijk
- Vermijd plotselinge bewegingen bij hoge stand
- De optionele verstelbare voetenring is bedoeld om de voeten op hoogte te ondersteunen en is niet bedoeld als opstap- of afstaphulp
- Rijd niet met de stoel over obstakels
- Gebruik de stoel niet wanneer deze defecten vertoont.

Ringmechaniek tbv
zithoogteverstelling



Voetbediening tbv
zithoogteverstelling



Draaiknop tbv
rughoogteverstelling



Hendel tbv
zithoekverstelling

Hendel tbv
zithoogteverstelling

Verstelbare voetenring
dmv draaiknop

